

TILTENKT BRUK

Proov Check tidlig graviditetstest er en in vitro-diagnostisk, visuell kvalitativ immunokromatografisk analyse utviklet for rask påvisning av humant korion-gonadotropin (hCG) i urin, for å bidra til tidlig oppdagelse av graviditet. Urin skal samles i en kopp – testen er ikke ment for bruk direkte i urinstrålen. For bruk uten resept (OTC).

INNHold

Hver test består av én rask lateral-flow immunokromatografisk analyse. Testen inneholder en kombinasjon av antistoffer, inkludert et monoklonalt hCG-antistoff som selektivt registrerer forhøyede hCG-nivåer. Når testen gjennomføres ved å senke teststrimmelen i en urinprøve, trekkes prøven gjennom membranen ved kapillærkraft og reagerer med det fargede konjugatet. En farget strek dannes i testområdet på membranen når en positiv prøve reagerer med det spesifikke antistoff-hCG-fargede konjugatet. Fravær av en farget strek indikerer et negativt resultat. En kontrollstrek vil alltid vises som en prosedyrekontroll.

OPPBEVARING OG STABILITET

1. Oppbevares ved 2 °C til 30 °C i den forseglede posen frem til utløpsdatoen som er angitt på

vurdert som positive med referansetesten utført av profesjonelt personale. Alle ikke-gravide kvinner testet negativt med Proov Check tidlig graviditetstest, og det profesjonelle personalet fikk også negative resultater med referansetesten.

etiketten. Hvis testen oppbevares i kjøleskap, la den oppnå romtemperatur før bruk.

2. Åpne posen bare noen få minutter før testen skal utføres.
3. Oppbevares beskyttet mot sollys, fuktighet og varme. Ikke bruk testen dersom posen er punktert eller ikke korrekt forseglet.
4. MÅ IKKE FRYSES (temperatur under 0 °C).

KVALITETSKONTROLL

En prosedyrekontroll er inkludert i testen. En rød strek som vises i kontrollområdet (C), regnes som en intern prosedyrekontroll. Den bekrefter at reagensene fungerer som de skal, at det er brukt tilstrekkelig prøvemateriale, og at prosedyren er fulgt korrekt. Hvis testen ikke viser noen kontroll- eller teststrek i vinduet, skal testen kasseres. Utfør testen på nytt med en ny test og følg prosedyren nøye. Hvis også den andre testen ikke viser noen streker, vennligst kontakt oss.

BEGRENSNINGER

1. Du bør ikke basere vurderingen av din kliniske tilstand utelukkende på resultatene fra en graviditetstest.
2. En lav konsentrasjon av hCG i et svært tidlig

svangerskap kan gi et negativt resultat. I så fall bør en ny urinprøve samles minst 48 timer senere og testes på nytt.

3. Forhøyede nivåer av hCG kan skyldes andre tilstander enn graviditet. Derfor bør påvisning av hCG i urin ikke brukes til å diagnostisere graviditet med mindre disse tilstandene er utelukket.
4. Visse helsetilstander, som en ovariecyste eller en graviditet utenfor livmoren (ektopisk graviditet), kan gi falske eller uregelmessige resultater.
5. Testen er kun beregnet til tidlig påvisning av graviditet.
6. Forhøyede nivåer av hCG er funnet hos pasienter med gestasjonell og ikke-gestasjonell trofoblastisk sykdom. Dersom relevant, bør disse tilstandene utelukkes før en graviditetsdiagnose stilles.
7. Unormal graviditet kan ikke skilles fra normal graviditet basert utelukkende på hCG-målinger.
8. Legemidler som inneholder hCG (for eksempel Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) kan gi falsk positivt resultat.

FORHOLDSREGLER

1. Testene er kun for in vitro-diagnostikk og utvendig bruk. Skal ikke inntas.
2. Kasseres etter bruk; teststrimmelen må ikke brukes mer enn én gang.

3. Må ikke brukes etter utløpsdatoen.
4. Skal ikke brukes dersom posen ikke er korrekt forseglet.
5. Oppbevares utilgjengelig for barn.
6. Les alle instruksjoner nøye før bruk. Feil bruk kan føre til ugyldige resultater.
7. Dette produktet er ikke beregnet som prevensjon.
8. Det er alltid best å konsultere lege før man prøver å bli gravid.
9. Urinprøver kan være smittefarlige; sørg for korrekt håndtering, og kasser alle brukte testprodukter i samsvar med lokale forskrifter.

YTELSESEGESKAPER

Følsomhet: Denne følsomheten er bekreftet ved hjelp av hCG-standarder i urin. Resultatene viste at testens analytiske følsomhet (laveste konsentrasjon som gir 100 % positive resultater) er 25 mIU/mL.

Nøyaktighet: Det ble gjennomført en klinisk (OTC) studie. Urinprøver ble samlet inn fra 24 deltakere som klinisk var bekreftet gravide, og 76 deltakere som ikke var gravide. Alle de 24 prøvene fra gravide kvinner testet positivt med Proov Check tidlig graviditetstest, og de ble også

Betydning av symboler på emballasjen

	Oppbevarings-temperatur		Lotnummer
	In-vitro diagnostisk produkt		Utløpsdato
	Merk! Les bruksanvisningen for riktig bruk		Produsent
	Kan ikke gjenbrukes		Inneholder nok til 1 test
	Autorisert representant		Oppbevares tørt
	Beskyttes mot sollys		Katalognummer
	Unik enhets-identifikasjon		Importør

 Healgen
3818 Fuqua Street
Houston,
TX, USA 77047

Distributed by:
Proov
5485 Conestoga Ct. #210
Boulder, CO, USA 80301

 QARAD BV
Cipalstraat 3, 2440 Geel
BELGIUM

Australian Sponsor:
2San Pty Ltd
Level 35 Tower One
100 Barangaroo Ave,
Sydney NSW 2000,
Australia


0123

 E-Invasion A/S
Artillerivej 86, 1
2300 København S
Danmark
E-post: info@babyplan.no


Babyplan®

Når store drømmer skal gå i oppfyllelse, er det ofte de små tingene som gjør forskjell. La Babyplan hjelpe deg med å øke dine sjanser for å bli gravid.

Babyplan.no

proov/
check Tidlig
Graviditetstest

Graviditetstest til hjemmebruk – for tidlig påvisning av hCG

Bruksanvisning


1. Slik tar du en Proov hCG-test
2. Slik leser du av resultatene dine
3. Hva betyr resultatet ditt?

Proov Check tidlig graviditetstest

KUN FOR IN VITRO-DIAGNOSTISK BRUK

Hva er hCG, og hva forteller det meg?

Når du er gravid, produserer kroppen din et hormon som kalles hCG (humant korion-gonadotropin). Tidlige graviditetstester er vanligvis basert på å påvise eller måle hCG. Dette hormonet vises i urinen kort tid etter befruktning og implantasjon, og nivået fortsetter deretter å stige.

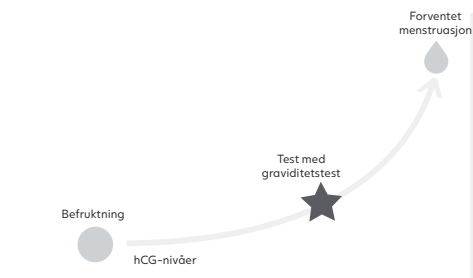

MERK

Les vennligst all informasjon i pakningsvedlegget før du utfører testen.

MEDFØLGENDE MATERIELL:

1. Teststrimmel
2. Bruksanvisning

MATERIELL SOM KREVES, MEN IKKE ER INKLUDERT:

1. Ur eller tidsur
2. Beholder til oppsamling av urinprøve
3. Latekshansker

1. Slik tar du en Proov tidlig graviditetstest

HUSK: Du kan ta en Proov Check tidlig graviditetstest med hvilken som helst urinprøve, men morgenurin er best fordi den har høyest konsentrasjon av hCG..

1: TISS

Samle urinprøven din i en ren og tørr kopp

HUSK: Ta vare på urinprøven til du har brukt teststrimmelen og lest av resultatet. Da kan du enkelt teste på nytt med samme prøve hvis det oppstår en feil

2: DYPP


Ta teststrimmelen ut av folieposen og bruk den så raskt som mulig.

Dypp strimmelen ned til MAX-pilene og hold den der til du ser urinen begynne å bevege seg oppover strimmelen (vanligvis cirka 10 sekunder).

3: VENT

Legg strimmelen på en flat, ikke-sugende overflate og vent mens den utvikler seg (5–10 minutter). Bruk tidsur.

Hvis du leser av testen før 5 minutter eller etter 10 minutter, kan resultatet bli unøyaktig.

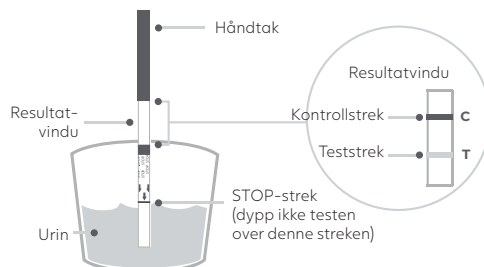

2. Slik leser du av resultatet



POSITIV

Hvis to tydelige røde streker vises på testen – uansett hvor svak den ene er – er testen positiv, noe som indikerer at hCG er til stede. Den ene streken skal være i kontrollområdet (C), og den andre i testområdet (T).



NEGATIV

Hvis det kun vises én strek i kontrollområdet (C), er resultatet negativt.



UGYLDIG

Dersom det på noe tidspunkt under testprosessen ikke vises noen streker i det hele tatt, eller hvis bare teststreken vises, har testen ikke fungert korrekt. Kontakt oss.



Ta et bilde 5–10 minutter etter at du har dyppet strimmelen. Slik kan du alltid se resultatet ditt igjen. Trenger du hjelp?

Vi hjelper deg gjerne: proov@babyplan.com

3. Hva betyr resultatet ditt?

Positive resultater

Et positivt resultat med Proov Check tidlig graviditetstest betyr høyest sannsynlig at du er gravid. Vi anbefaler at du kontakter legen din for å få bekreftet graviditeten og diskutere neste steg. Hvis du er usikker på resultatet, bør du teste på nytt minst 48 timer etter den første testen. Den andre streken vil bli mørkere etter hvert som hCG-nivået stiger etter implantasjon.

Negative resultater

Et negativt resultat med Proov Check tidlig graviditetstest kan bety at du ikke er gravid, at hCG-nivået ennå ikke er høyt nok til å påvises, eller at du kan ha feilberegnet datoen for forventet eller uteblitt menstruasjon. Hvis du er usikker på resultatet eller fortsatt mistenker at du er gravid, bør du teste igjen minst 48 timer etter den første testen. Dersom du er gravid, vil den andre streken bli mørkere etter hvert som hCG-nivået stiger etter implantasjon. Hvis testen fremdeles er negativ etter uteblitt menstruasjon, bør du kontakte legen din.

Spørsmål & svar

1. Hvor raskt etter at jeg mistenker graviditet, kan jeg ta testen?

Du kan teste urinen allerede fra den første dagen menstruasjonen uteblir. Du kan utføre testen når som helst på dagen, men hvis du er gravid, inneholder morgenurin den høyeste konsentrasjonen av graviditetshormon.

2. Må jeg teste med morgenurin?

Selv om du kan teste når som helst på dagen, er morgenurin vanligvis mest konsentrert og vil derfor inneholde mest hCG.

3. Hvilke faktorer kan påvirke testresultatet?

Legemidler som inneholder hCG (for eksempel Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) kan gi et falskt positivt resultat. Alkohol, p-piller, smertestillende, antibiotika eller hormonbehandling som ikke inneholder hCG, skal ikke påvirke testresultatet.

4. Betyr et positivt resultat noe annet enn en normal graviditet?

Ja, andre medisinske tilstander eller legemidler kan gi et positivt resultat. Kontakt legen din ved ethvert positivt graviditetsresultat.

5. Hvordan vet jeg om testen er utført korrekt?

At en rød strek vises i kontrollvinduet (C) bekrefter at du har fulgt prosedyren riktig, og at riktig mengde urin er absorbert.

6. Hva gjør jeg hvis resultatet viser at jeg ikke er gravid?

hCG-konsentrasjoner varierer mye tidlig i graviditeten. Hvis du ikke får menstruasjon innen én uke etter forventet dato, bør du teste på nytt med en ny test. Får du samme resultat igjen og menstruasjonen fortsatt uteblir, kontakt legen din.